

# Otriven

## Meerwasser mit Eukalyptus

### Nasenspray

Natürliches, hypertones Meerwasser mit ätherischem Eukalyptusöl

**⚠ Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Otriven Meerwasser mit Eukalyptus anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

Bei einer Erkältung führt der entzündliche Prozess zu einem Anschwellen der Nasenschleimhaut, einer verstopften Nase und einer vermehrten Schleimproduktion. Das hypertone\* Meerwasser schafft eine Druckdifferenz zwischen der Lösung und der Schleimhaut (osmotischer Effekt); dies ermöglicht ein Abschwellen der Nasenpassage. Dieses Produkt erweicht und löst durch seine physikalische Wirkung in der Nasenhöhle zudem überschüssigen Schleim und hilft dabei, Bakterien und Viren aus der Nase zu entfernen.

\* Hypertone Meerwasserlösungen unterscheiden sich von isotonen Meerwasserlösungen durch die auf 2,2 % eingestellte Meersalzkonzentration, die wirksam die verstopfte Nase befreien kann. Noch dazu ist diese Konzentration sanft genug, um die Nasenschleimhaut nicht zu reizen.

### 1. Was ist Otriven Meerwasser mit Eukalyptus und wofür wird es angewendet?

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist ein konservierungsmittelfreies Nasenspray, das natürliches, hypertones Meerwasser kombiniert mit ätherischem Eukalyptusöl und einem Extrakt aus Ackerminze enthält. Die unverdünnte Lösung bewahrt außerdem die wichtigen Mineralien und Spurenelemente, die in Meerwasser enthalten sind.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist ein natürliches, intensiv abschwellendes Nasenspray, das:

- die aufgrund einer Erkältung und Nasennebenhöhlenentzündung (Rhinosinusitis) zugeschwollene oder verstopfte Nase durch Abschwellen der Nasenschleimhaut natürlich und wirksam befreit
- der Entwicklung weiterer Infektionen vorbeugt, indem:
  - seine reinigende Wirkung die Nasenpassage befreit
  - es dabei hilft, im Schleim sitzende Bakterien und Viren durch natürliche mechanische Wirkung zu entfernen
- ein sofortiges Gefühl der Linderung und Frische verschafft
- keine austrocknende Wirkung besitzt und die Nasenhöhlen befeuchtet.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus kann helfen, die Anwendung von abschwellenden Arzneimitteln zu reduzieren.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene geeignet.

### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Otriven Meerwasser mit Eukalyptus beachten?

**⊘** Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es kaputt oder beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sein ursprüngliches Aussehen verloren hat.

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden.

Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Spray nach einer Operation oder Verletzung der Nase anwenden.

Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.

Das Produkt darf in der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht angewendet werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an Asthma leiden.

### 3. Wie ist Otriven Meerwasser mit Eukalyptus anzuwenden?

Für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene:  
2 bis 3 Sprühstöße in jedes Nasenloch bis zu 6 mal täglich.

#### Gebrauchsanweisung:

1. Schnäuzen Sie die Nase.
2. Schütteln Sie die Flasche vor der Anwendung.
3. Nehmen Sie die Schutzkappe von der Sprühflasche, siehe **Abbildung 1**.
4. Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Vermeiden Sie es, in Augen oder Mund zu sprühen.
5. Halten Sie die Flasche aufrecht mit dem Daumen unter dem Boden und dem Sprühkopf zwischen zwei Fingern.
6. Neigen Sie den Kopf leicht nach vorn und führen Sie den Sprühkopf in das Nasenloch ein, siehe **Abbildung 2**.
7. Während des Sprühvorgangs leicht durch die Nase einatmen.
8. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch.
9. Lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken. Sie sollten die Nase in dieser Zeit nicht schnäuzen, sondern, falls nötig, abwischen.
10. Anschließend schnäuzen Sie gegebenenfalls die Nase.



Abbildung 1



Abbildung 2

### Hygienehinweis, um Kontaminationen zu vermeiden:

- Reinigen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit heißem Wasser, trocknen Sie ihn ab und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.
- Das Spray sollte immer nur von einer Person benutzt werden. Bei Verwendung durch mehr als eine Person besteht die Möglichkeit sich anzustecken.

## 4. Was müssen Sie zu Ihrer Sicherheit noch beachten?

Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Spray nach einer Operation oder Verletzung der Nase anwenden. Wenn die nasalen Symptome nach 7 Tagen weiterhin bestehen, suchen Sie eine medizinische Fachperson auf.

Darf nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Bei Reizungen der Nasenschleimhaut kann während des Gebrauchs ein vorübergehendes Kribbeln auftreten.

Bei weiteren Fragen zur Anwendung dieses Produkts fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 5. Wie ist Otriven Meerwasser mit Eukalyptus aufzubewahren?

### Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Nasenspray darf nur bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum verwendet werden.

Nach Anbruch darf das Produkt nicht länger als 6 Monate angewendet werden.

Nicht unter 0 °C und nicht über 25 °C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

## 6. Weitere Informationen

**Zusammensetzung:** Meerwasser (hyperton bei 2,2 % Meersalzkonzentration), mit ätherischem Öl aus *Eucalyptus globulus* (Hilfsstoff), Menthol aus *Mentha arvensis* extrahiert (Hilfsstoff).

Ohne Konservierungsstoffe. Ohne Treibgas.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist erhältlich als Dosierspray mit 20 ml Lösung.



Laboratoire de la Mer, Z.A.C de la Madeleine,  
Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, France

### Vertrieb

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

80258 München

Barthstraße 4, 80339 München


Telefon +49 (89) 78 77-209

Telefax +49 (89) 78 77-304

E-Mail: [medical.contactcenter@gsk.com](mailto:medical.contactcenter@gsk.com)



Medizinprodukt

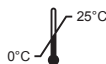

### Stand der Information: 2020/06

#### Bedeutung der Symbole:



Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Vorsicht. Vor Gebrauch beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.



Temperaturbereich bei Lagerung.



Verwendbar bis:



Chargenbezeichnung



Nach dem Gebrauch wegwerfen.



Recyclingsymbol für Papier



Recyclingsymbol für Pappe

Marken sind Eigentum von oder lizenziert an GSK.

A 72-0 – CN0T1361

