

Otri-Natural

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten

Sterile, isotonische Kochsalzlösung mit 0,9 % Natriumchlorid

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie OtriNatural Baby Einzeldosispipetten anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

1 Warum ist eine Nasenreinigung durch Spülen mit Kochsalzlösung wichtig?

Die Nasenatmung ist bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen oft durch Schleimansammlung, Krusten und Trockenheit in der Nase eingeschränkt. Eine Ansammlung von Schleim kann häufig bei Babys vorkommen und eine verstopfte oder laufende Nase verursachen. In diesen Situationen kann ein Baby, das noch nicht in der Lage ist, sich zu schnäuzen, Schwierigkeiten beim Atmen, bei der Nahrungsaufnahme und beim Schlafen haben und dann gereizt und unruhig sein.

Das Reinigen und Spülen der Nase mit Kochsalzlösungen kann helfen, eine verstopfte Nase zu verhindern und zu lindern. Es kann dazu beitragen, Komplikationen wie Ohren- und Nasennebenhöhlenentzündungen zu vermeiden. Besonders in der frühen Kindheit können Sie einen Nasensauger in Kombination mit dieser Kochsalzlösung verwenden, um die Nase zu reinigen und zu spülen.

2 Was sind OtriNatural Baby Einzeldosispipetten und wofür werden sie angewendet?

Bei OtriNatural Baby Einzeldosispipetten handelt es sich um eine sterile, isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsstoffe.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten werden empfohlen zum:

- Reinigen und Spülen der Nasenlöcher: Reinigen der Nasenhöhlen bei verstopfter Nase, z. B. bei Erkältungen oder Allergien, durch Ausspülen des überschüssigen Schleims oder der Allergenpartikel wie Staub oder Pollen.
- Befeuchten der Nase: bei leichten Reizungen der Nase, wie Trockenheit aufgrund geringer Luftfeuchtigkeit (z. B. durch beheizte/klimatisierte Räume, große Höhe, Flugreisen).
- Aufweichen und Entfernen von überschüssigem Schleim: Verdünnen und Lösen des Schleims, um ihn entfernen zu können.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten eignen sich besonders zum täglichen Reinigen und Spülen der Nase von Säuglingen (ab 2 Wochen), die noch nicht in der Lage sind, sich zu schnäuzen:

- Tägliches Reinigen und Spülen der Nase, um Nasenschleim zu lösen und zu entfernen, kann ihnen helfen, leichter zu atmen und zu schlafen, das Essen zu erleichtern und ihr Wohlbefinden zu verbessern.
- Unmittelbar nach der Anwendung der Lösung kann ein Nasensauger verwendet werden. Die Verwendung eines Nasensaugers in Kombination mit diesem Produkt kann das Entfernen von Schleim aus der Nase erleichtern und dadurch das Risiko weiterer Komplikationen wie Ohren- oder Nasennebenhöhlenentzündungen verringern. Sie kann auch die Schlafqualität von Babys während einer Erkältung verbessern.

Sie können OtriNatural Baby für die unten aufgeführten Erkrankungen verwenden:

- Durch übermäßigen Schleim verstopfte Nase bei einer Erkältung, grippalem Infekt oder Nasennebenhöhlenentzündung.
- Allergische Rhinitis.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten können verwendet werden zum:

- Aufweichen von Schleim.
- Entfernen von überschüssigem Schleim.
- Reinigen und Spülen der Nase.

Verwenden Sie OtriNatural Baby Einzeldosispipetten nicht, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind (siehe Zusammensetzung).

3 Was sollten Sie vor der Anwendung von OtriNatural Baby Einzeldosispipetten beachten?

⚠ Vorsicht, vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.

Wenn Sie OtriNatural Baby Einzeldosispipetten zum Reinigen und Spülen der Nase verwenden, sollten Sie sie bei gleichzeitiger Verwendung eines anderen Produkts zur nasalen Anwendung (z. B. bei Erkältung oder Allergie) zuerst anwenden.

Bei normaler Anwendung, wie angegeben, werden OtriNatural Baby Einzeldosispipetten sehr gut vertragen.

Sie können OtriNatural Baby Einzeldosispipetten während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Wie sind OtriNatural Baby Einzeldosispipetten anzuwenden?

Die übliche Anwendungshäufigkeit beträgt 2- bis 4-mal täglich pro Nasenloch.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten sind geeignet für Säuglinge/Kleinkinder, Kinder und Erwachsene, einschließlich schwangerer und stillender Frauen. Sie sollten jedoch ärztlichen Rat einholen, bevor Sie sie bei Säuglingen unter 2 Wochen anwenden oder wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Bei Kindern unter 11 Jahren sollten OtriNatural Baby Einzeldosispipetten unter Aufsicht eines Erwachsenen angewendet werden und können von einer betreuenden Person oder medizinischem Fachpersonal verabreicht werden.

Bei Patienten über 11 Jahren können OtriNatural Baby Einzeldosispipetten ohne Aufsicht eines Erwachsenen angewendet





werden, wenn Sie/der Patient geistig dazu in der Lage sind bzw. der Patient wach ist. Die Anwendung kann entweder vom Patienten selbst, einer betreuenden Person oder medizinischem Fachpersonal erfolgen. Bei älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung kann die Anwendung der Einzeldosispipette die Hilfe eines Erwachsenen erfordern. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Kontaminationen ist die Einzeldosispipette für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nur von einer Person verwendet werden. Eine geöffnete Pipette nicht wiederverwenden. Gebrauchte Pipetten müssen entsorgt werden. Bei Raumtemperatur (17 °C bis 30 °C) verwenden, um unerwünschte Nebenwirkungen wie Brennen und Stechen zu vermeiden. **Nicht einfrieren.**

Anleitung zum Reinigen und Spülen der Nase:

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die Einzeldosispipette öffnen.
2. Schnäuzen Sie sich bei Bedarf.
3. Brechen Sie eine Einzeldosispipette ab und öffnen Sie sie, indem Sie den Verschluss abdrehen.
4. Beugen Sie den Kopf nach hinten und platzieren Sie die Spitze der Pipette direkt im Nasenloch.
5. Drücken Sie vorsichtig auf die Pipette, um ein paar Tropfen zu erhalten. Drücken Sie stärker, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist. Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch.
6. Warten Sie einige Sekunden und schnäuzen Sie sich bei Bedarf.
7. Bei der Reinigung der Nasenlöcher eines Säuglings oder Kleinkindes, das sich nicht schnäuzen kann, kann zusätzlich ein Nasensauger zum Entfernen von Schleim verwendet werden.
8. Entsorgen Sie gebrauchte Pipetten und waschen Sie Ihre Hände.

5 Zu Ihrer Sicherheit

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf.

Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung, nicht zur Injektion. Bei einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe (siehe Zusammensetzung) das Produkt nicht verwenden.

Geben Sie die Lösung nicht in die Augen, den Mund oder die Ohren.

Keine Einzeldosispipette verwenden, die defekt oder beschädigt ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Melden Sie schwerwiegende Produktvorfälle, die in Zusammenhang mit der Anwendung von OtriNatural Baby Einzeldosispipetten auftreten, dem lokalen Hersteller und der zuständigen Behörde vor Ort.

6 Wie sind OtriNatural Baby Einzeldosispipetten aufzubewahren?

Zwischen 0 °C und 30 °C lagern.

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum.

Nicht einfrieren.

Einzeldosispipetten in der Originalverpackung aufbewahren.

Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend Ihren örtlichen Anforderungen. Berücksichtigen Sie stets die Umwelt.

7 Weitere Informationen

Zusammensetzung: 0,9 % Natriumchlorid und gereinigtes Wasser. Ohne Konservierungsstoffe.

0,045 g Natriumchlorid (Inhaltsstoff zur Isotonisierung) pro Einzeldosispipette, mit gereinigtem Wasser (Lösungsmittel) auf 5 ml aufgefüllt.

OtriNatural Baby ist in einer Packungsgröße mit 20 Einzeldosispipetten à 5 ml Lösung erhältlich.



Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Schweiz



Haleon Medical Devices, Clocharane,
Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford,
X35 Y983, Irland



Vertrieb: Haleon Germany GmbH
80258 München
Tel.: 0800 664 5626
E-Mail: mystory.de@haleon.com



STERILE A

CE 0459

MD

Stand: November 2024

Bedeutung der Symbole



Vorsicht



Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Temperaturbereich bei Lagerung



Hersteller



Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft



Nicht zur Wiederverwendung



Unter Verwendung aseptischer Techniken sterilisiert.



Einfaches Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung



Einfaches Sterilbarriersystem



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Importeur



Vertrieb



Medizinprodukt

Marken sind Eigentum von oder lizenziert an Haleon.
© 2025 Haleon oder Lizenzgeber